

Snadno se přihodí,
rychle se zahojí



www.flamigel.cz

DAHLHAUSEN CZ
... intenzivní péče



POPÁLENINY ZPŮSOBENÉ SLUNCEM

Princip:

Flamigel je hydroaktivní gel. Podporuje proces hojení, tvorbu nové tkáně a zacelení kůže. Příjemně chladí a zklidňuje pokožku.

Způsob použití:

Povrchové popáleniny a popáleniny způsobené sluncem

Opatrně rozetřete Flamigel na postižené místo a nechte působit k zajištění chladivého a uklidňujícího účinku. Nevírejte do kůže.

Aplikujte 1 - 2x denně, v případě popálení sluncem 2 - 6x denně.

Otevřené rány a popáleniny:

1. Vymyjte a vyčistěte ránu.
2. Vysušte ránu pomocí sterilního tampónu.
3. Naneste silnou vrstvu min. 5mm Flamigelu na ránu, snažte se vyhnout okolí rány. V případě hluboké rány vyplňte zhruba 2/3 objemu rány Flamigelem.
4. Překryjte mastným tylem a převažte obvazem nebo překryjte transparentní polyuretanovou folií (k dostání v lékárnách nebo na www.dahlhausen.cz).
5. Zachovejte Flamigel na místě co nejdéle, dokud struktura gelu zůstává neporušená.

Popáleniny/odřenin, řezné rány a pořezání:

Krytí obnovujte každých 24 hodin.

Proleženiny:

Rány černé a žluté převazujte každých 24 až 48 hodin.

Rány červené převazujte každé 2 až 3 dny.

Flamigel je k dostání v lékárnách a v distribuci společností Phoenix, lékárenský velkoobchod a.s., Alliance UniChem CZ, spol. s r.o., Pharmos, a.s. a v databázi společnosti Pharmdata.